

CAMERA DE INHALARE

Manual de utilizare

Model: RedLine MistChamber

Pentru o administrare mai simpla si mai eficienta a medicamentelor, medicii recomanda ca impreuna cu inhalatorul sa se foloseasca si camera de inhalare cu supapa (spacer).


Camera de inhalare **RedLine MistChamber** este un dispozitiv portabil, din materiale antistatice, potrivita pentru persoanele cu afectiuni respiratorii. Aceasta se mai recomanda si pacientilor pentru care utilizarea dispozitivelor de inhalare de tip aerosoli pare dificila. Cu ajutorul ei, medicamentele pot fi administrate incet si astfel permite utilizatorului sa respire atunci cand este pregatit.

Avantajele utilizarii camerei de inhalare RedLine MistChamber



Atunci cand utilizati doar inhalatorul

Medicamentul ajunge adesea in gura, gat sau stomac si este dificil de sincronizat momentul pulverizarii cu cel al respiratiei. Pe langa gustul neplacut cauzat, acesta mai poate avea si efecte secundare.

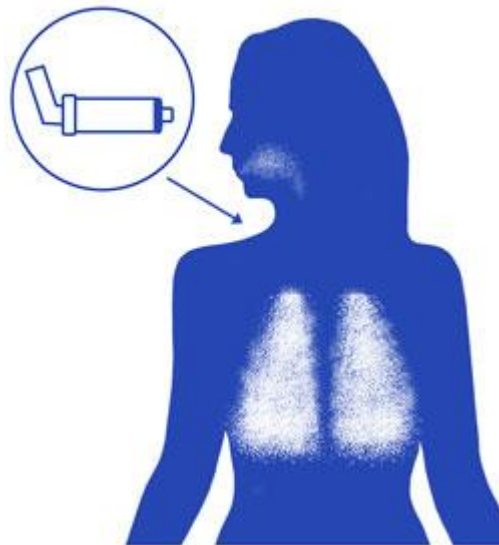

Atunci cand utilizati inhalatorul impreuna cu Camera de inhalare MistChamber

Medicamentul este administrat in cantitate mai mare in plamani, unde acesta este mai eficient. Un alt avantaj al folosirii spacer-ului consta in faptul ca nu mai este necesara coordonarea actionarii inhalatorului cu inspiratia.



SUPAPA DE INHALARE

Supapa cu rezistenta scazuta este conceputa astfel incat sa se deschida si in conditii de debit redus, ceea ce permite utilizatorului sa respire cu usurinta.



ADAPTOR MDI

Camera de inhalare **Redline MistChamber** are proiectat adaptorul MDI astfel incat sa fie perfect pentru inhalatoarele cu doza masurata.

Pachetul **contine doar tubul de inhalare si masca**, spray-ul inhalator din imaginile descriptive este doar pentru a explica functionarea acestui dispozitiv.

Componente

1. Masca (in funtie de pachetul ales)
2. Camera antistatica
3. Adaptor MDI


ATENTIONARE!

Inainte de utilizare, verificati intotdeauna sa nu existe resturi in interiorul mastii si a camerei de inhalare.


Atunci cand masca este utilizata de catre copii sau in apropierea acestora, este necesara supravegherea lor. Folositi masca doar pentru tratament, dupa care depozitati-o intr-un loc curat unde copii nu au acces.

Mod de utilizare


1. Scoateti capacul de la inhalator.

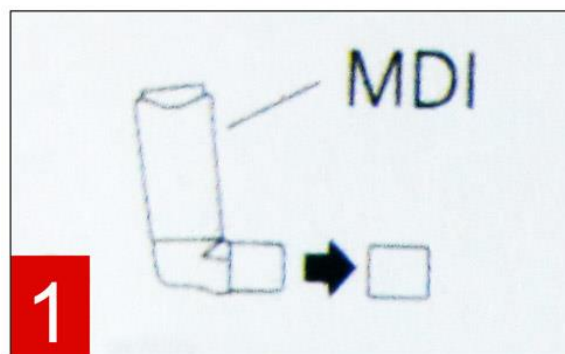

2. Luati cu grija inhalatorul pentru a-l fixa la camera de inhalare.

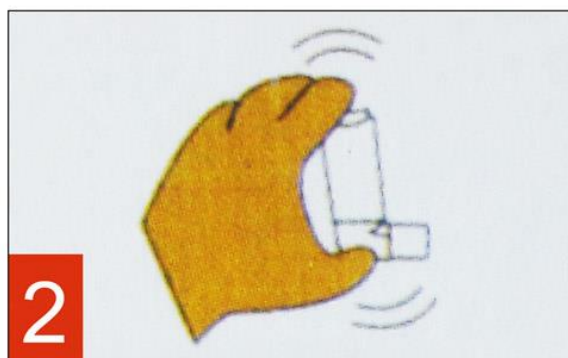

3. Introduceți cu grija piesa bucala a inhalatorului în spatele camerei.

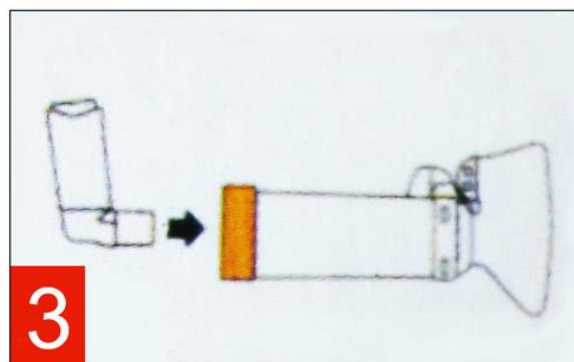

4. Tineti apasata masca pe nas si pe gura.
Eliberati un puf, inspirati si expirati de 6 ori.

Daca medicul dvs v-a prescris un anumit tip de tratament, urmati instructiunile prescrise.




Curatare si depozitare

1. Detasati cu grija masca de la camera de inhalare.
2. Agitati piesele intr-un vas cu apa calda (nu fierbinte) si sapun timp de 2 minute, dupa care le lasati la inmuiat timp de 10 min.
3. Curatati masca si camera cu un jet de apa calda curata si eliminati excesul de umiditate prin scuturare. Inainte de a atasa masca la camera lasati componentele sa se usuce la aer uscat.
4. Atasati masca la camera si depozitati intr-un loc uscat si racoros, departe de razele directe solare.

Atentie!

A nu se steriliza sau fierbe!

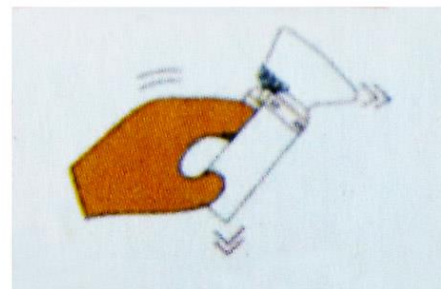

CARACTERISTICI:

- Camera de inhalare din material antistatic;
- Masca din material moale PVC, netoxic (pentru pachetele care includ masca);
- Supapa de inhalare cu rezistenta scazuta;
- Administrare eficienta a medicamentelor;
- Volum 180 ml.
- Dimensiuni camera de inhalare (fara masca): 15 x 5.3 x 5.3 cm.
- Greutate camera (fara masca): 55 g

IMPORTATOR: S.C. BIT ONLINE SRL Bucuresti, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro